



Mycie i dezynfekcja oraz konserwacja systemów ssących i umywalek w unitach stomatologicznych

aspirmatic®
płyn

Zalety

- szerokie spektrum działania,
- bardzo dobre właściwości myjące,
- nie zawiera aldehydów,
- możliwość stosowania m.in.: w unitach stomatologicznych KaVo, Sirona, Castellini,
- przydatny we wszystkich separatorach amalgamatu np. Dürr, Metasys,
- ekonomiczny, łatwy w użyciu,
- nie tworzy piany,
- pozostawia świeży zapach,
- skuteczny w obecności zanieczyszczeń organicznych

Obszary zastosowania

aspirmatic®: preparat do codziennego mycia, dezynfekcji i konserwacji używanych w stomatologii systemów ssących i spluwaczek w unitach stomatologicznych. aspirmatic® może być stosowany również do dezynfekcji w urządzeniach wykorzystywanych w laryngologii.

Właściwości produktu

Przystosowane do wspólnego stosowania preparaty aspirmatic® (myjąco-dezynfekujący) i aspirmatic® cleaner (specjalny preparat myjący) umożliwiają kompleksowe utrzymanie higieny unitów stomatologicznych. Działa bakteriobójczo, drożdżakobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo wobec BVDV i wirusa vaccinia.

Wskazówki dotyczące stosowania

W wyniku codziennego odsysania substancji organicznych i nieorganicznych zachodzi niebezpieczeństwo, iż substancje te odkładają się będą w przewodach, zasychają i stanowią potencjalne źródło zakażenia dla personelu podczas wymiany filtrów. By uniknąć zakłóceń w funkcjonowaniu systemów

odsysania przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa higienicznego należy stosować tzw. program aspirmatic®. Preparat aspirmatic® stosuje się do mycia i dezynfekcji, w stężeniu 2%. Preparat aspirmatic® zaleca się stosować dwa razy w ciągu dnia pracy tj. w połowie (np. w czasie przerwy obiadowej) oraz pod koniec dnia pracy - po zakończeniu zabiegów. W tym celu należy przygotować 2 litry roztworu użytkowego aspirmatic® na każdy unit stomatologiczny. Wężę systemu ssącego wypełnić ok. 1,5 litra roztworu użytkowego, a pozostałe 0,5 litra wlać do umywalki unitu. Preparat aspirmatic® powinien być pozostawiony w systemie na co najmniej 30 minut. Nie mieszać koncentratów i roztworów użytkowych aspirmatic® i aspirmatic® cleaner. W przypadku silnego zanieczyszczenia krwią bezpośrednio po zabiegu instalację należy przepłukać wodą.

CE 0279



Dane produktu

100g preparatu aspirmatic® zawiera: 7,5g chlorku dioktylodimetyloamoniowego.

Oznakowanie zgodne z rozporządzeniem nr 648/2004: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% mydło, kompozycje zapachowe.

Pozostałe składniki: regulatory tworzenia piany, inhibitory korozji

Dane chemiczno-fizyczne

Forma	ciecz
Gęstość	ok. 0,99 g/cm ³ / 20 °C
Kolor	niebieski
pH	6,5 - 7,5 / 20 °C / koncentrat
Tarcie, dynamiczne	Nie oznaczono.
Temperatura zapłonu	Nie dotyczy

Wskazówki szczególne

Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności.

Termin ważności: 3 lata

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
ASPIRMATIC płyn 2L FL	5/Karton	150102

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Firma Schülke & Mayr GmbH produkuje preparaty z wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

Badania i informacje

Na życzenie dostarczymy niezbędne raporty dotyczące preparatu.



Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.



Przedsiębiorstwo należące do grupy Air Liquide



Dystrybutor
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schulke.com

Wytwórca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 40 - 52100 - 0
+49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com